



PRIM

Fisioterapia y Rehabilitación

al Servicio de la Salud

Baño extremidades inferiores, CÓD: 501785



PRIM


Fisioterapia y Rehabilitación

Manual de usuario



PRIM S.A.
Avenida del Llano Castellano 43, planta 3
28034 Madrid, España
Teléfonos: 91 334 25 86
Fax: 913 342 517
e-mail: info.fisioterapia@prim.es
www.prim.es

M.U. 501785 rev 7 05/12/2024

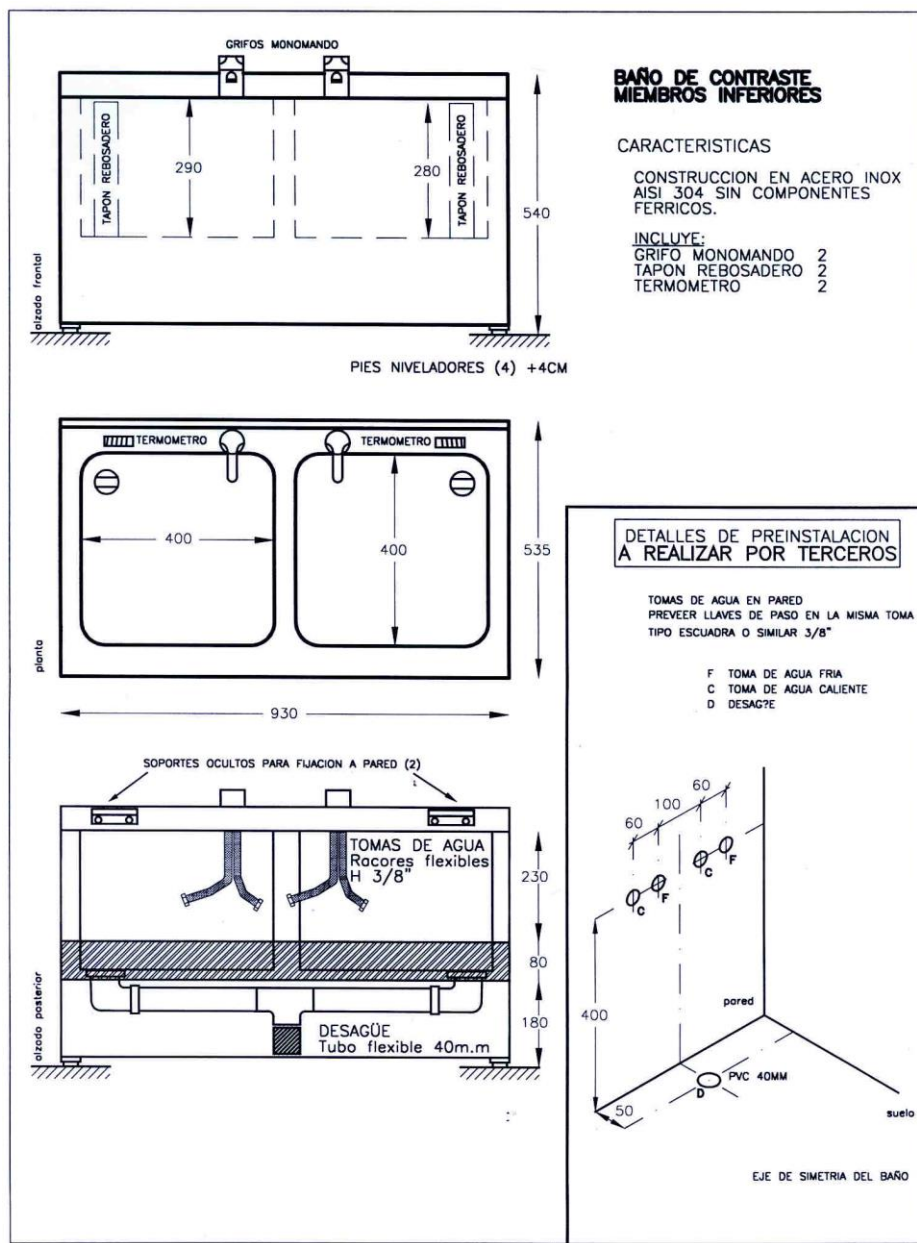

Indicaciones:

- ⇒ Para reducir edema en fases subagudas de la inflamación en artritis de articulaciones periféricas, esguinces y estiramientos musculares.
- ⇒ Para tratar muñones de amputaciones inflexibles.
- ⇒ En los estadios iniciales de procesos vasculares periféricos con importante componente espasmódico.
- ⇒ En el tratamiento de la distrofia simpaticorrepleja.

Contraindicaciones:

- ⇒ Microangiopatía secundaria a la diabetes, neuropatía diabética, endarteritis arteriosclerótica, hipersensibilidad al frío, insuficiencia venosa (si la temperatura es superior a 40°).
- ⇒ Aplicar con precaución en personas con venas varicosas, evitando temperaturas extremas.
- ⇒ Valorar su uso en personas con diabetes o en tratamiento contra el cáncer
- ⇒ Evitar el tratamiento en personas con flebitis y con síndrome de Raynaud (evitar tratamientos de frío)

Instrucciones de uso:

- ⇒ Este baño debe utilizarse siguiendo las indicaciones de un facultativo especialista.
- ⇒ En primer lugar, se deben llenar los recipientes, uno con agua caliente (38-44°C) y otro con agua fría (10-20°C). Los baños disponen de termómetros para medir la temperatura del agua de manera aproximada.
- ⇒ La extremidad se sumerge primero en el baño con agua caliente durante 7-10 minutos, después se sumerge en el baño con agua fría durante 1 minuto y posteriormente en el baño caliente durante 3 o 4 minutos. Los cambios deben hacerse con rapidez. El tratamiento dura 30 minutos y la última inmersión se debe hacer en agua caliente.

Advertencias:

- ⇒ Se deben vigilar los termómetros para evitar que el agua alcance una temperatura excesiva.
- ⇒ Oxidación: Si se observan manchas de óxido en el baño, se deben limpiar inmediatamente con un paño fuerte y un producto desengrasante hasta eliminarlas. La aparición de óxido es debida a partículas de hierro en el agua (porque la llave de paso ha estado cortada largo tiempo, porque se han utilizado elementos de hierro durante la instalación, etc.) para resolverlo se recomienda colocar un filtro de 5 µm en las conexiones de entrada de agua.

Mantenimiento:

- ⇒ Se recomienda el cambio de agua y una limpieza minuciosa del baño cada vez que sea utilizado por un paciente. Se debe utilizar un limpiador especial para acero inoxidable. En la mayoría de los casos se trata de productos para limpiar instalaciones sanitarias que deben diluirse antes de su utilización. Siempre lea las instrucciones antes de utilizar el producto. Se debe utilizar un paño, trapo o esponja sintética. No se debe utilizar lana de acero.

Clasificación: **Clase I**, no estéril, sin función de medición (este producto cumple con los requisitos del Reglamento (UE)2017/745 por el que se regulan los productos sanitarios).

Asistencia Técnica: En caso de avería o fallo debe ponerse en contacto con Prim S.A. indicando el código, descripción y nº de lote del aparato.

Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.



PRIM

Fisioterapia y Rehabilitación

al Servicio de la Salud

Baño extremidades superiores, CÓD: 501786



PRIM

Fisioterapia y Rehabilitación

Manual de usuario



PRIM S.A.
Avenida del Llano Castellano 43, Planta 3
28034 Madrid, España
Teléfonos: 91 334 25 86
Fax: 913 342 517
e-mail: info.fisioterapia@prim.es
www.prim.es

M.U. 501786 rev 7 05/12/2024

