




Magnetoterapia PMT Qs

Un nuevo estilo en Magnetoterapia

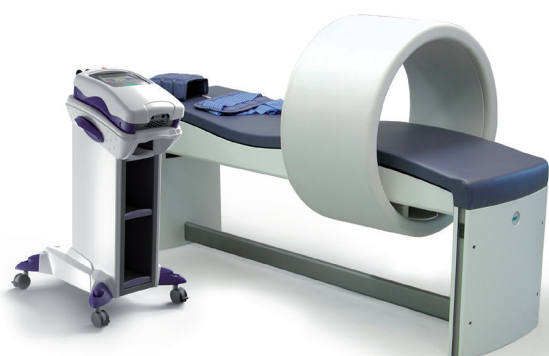

PMT Qs

PMT Qs es el equipo con un diseño innovador que es ergonómico, fácil de usar y equipado con un carrito. El generador de campo magnético pulsado es controlado por un microprocesador que gestiona 3 canales independientes: cada canal tiene 2 salidas a las que pueden conectarse 4 solenoides y 2 aplicadores Flexa.

PMT Qs, está disponible en las versiones automática o manual, se suministra con Camilla, solenoide de 80 cm $\varnothing$ y 2 aplicadores Flexa con vibración. Se pueden crear diferentes configuraciones con la suma de accesorios opcionales, para la conexión de hasta 4 camillas, dos de las cuales son automáticas. Los equipos PMT Qs aplican los campos magnéticos ELF (Extremely Low Frequency) en paralelo al eje longitudinal del cuerpo que están usando los solenoides, o perpendicular al área que va a ser tratada usando los aplicadores Flexa. Los aplicadores flexibles son particularmente apropiados para tratamiento dependiente y para curación de fracturas de los huesos grandes. Los solenoides más pequeños son ideales para realizar tratamientos de magnetoterapia que son específicos para miembros, mientras que los solenoides más grandes son perfectos para usarse en áreas más extendidas, hasta tratamiento de cuerpo completo, que es particularmente efectivo para artrosis difusas y osteoporosis.

Todos los accesorios suministrados con los PMT Qs también pueden ser usados para tratar pacientes que tienen placas para osteosíntesis, tornillos, endoprotesis ya que no hay modificaciones termales.

Marcado CE según directiva 93/42 CEE.

DATOS DE PEDIDO

508996 PMT Qs automática compuesta por:

Generador PMT Qs y carrito
Camilla con solenoide de $\varnothing$ 80cm, deslizamiento automático

458355 PMT Qs manual compuesta por:

Generador PMT Qs y carrito
Camilla con solenoide de $\varnothing$ 80 cm, deslizamiento manual

Aplicadores Flexa con efecto vibración

Opcionalmente se suministran 2 aplicadores flexa con el equipo que pueden ser gestionados simultáneamente por el mismo generador para realizar tratamientos localizados.

Características Técnicas

- 3 canales completamente independientes
- 6 salidas (2 por cada canal)
- Programas pre-establecidos que pueden ser modificados y guardados
- Frecuencia desde 0.5 a 100 Hz
- Intensidad campo magnético variable desde 5 a 100%
- Tiempo de tratamiento desde 1 a 99 mins y continuo (tiempo ilimitado)
- LCD de luz trasera
- Teclado de Membrana
- Potencia: 90-260V~ 50-60Hz 1000 VA max


Accesorios Opcionales

509030 Cama automática QS con solenoide 80 cm.

509031 Cama manual QS con solenoide 80 cm.

509033 Solenoide diam. 30 cm. PMT QS

509034 Solenoide diam. 52 cm. PMT QS

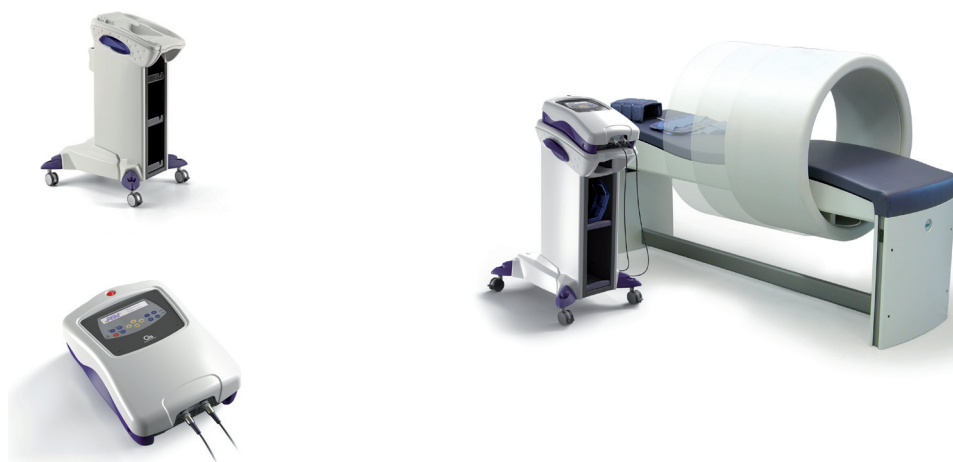

al Servicio de la Salud



C/ Yolanda González nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid

Teléfono: 91 334 24 00 - Fax: 91 334 25 17 - e-mail: info.fisioterapia@prim.es - www.primphysio.es