



PRIM

Fisioterapia y Rehabilitación

al Servicio de la Salud

Barras Paralelas 2 m, CÓD: 500698

Barras Paralelas 2.5 m, CÓD: 501497

Barras Paralelas 3 m, CÓD: 501387

Barras Paralelas 3.5 m, CÓD: 501365



PRIM

Fisioterapia y Rehabilitación


Manual de usuario



PRIM S.A.
Avenida del Llano Castellano 43, planta 3
28034 Madrid, España
Teléfonos: 91 334 25 86
Fax: 913 342 517
e-mail: info.fisioterapia@prim.es
www.prim.es


M.U. 500698 rev 7 05/12/2024

Paralelas

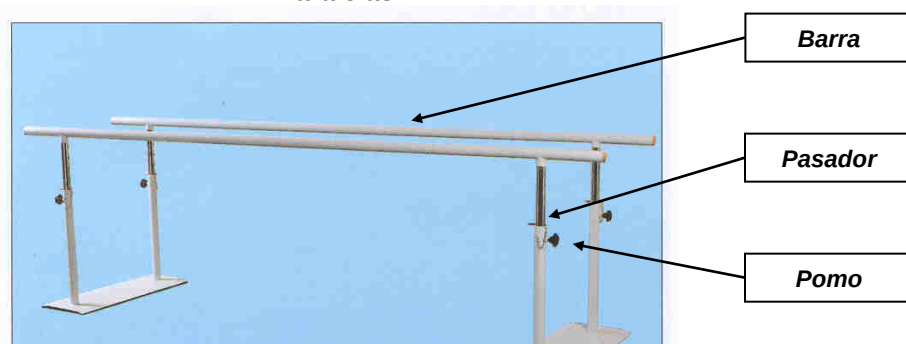


Instrucciones de instalación montaje y utilización

⇒ Las paralelas se suministran desmontadas (2 barras y 2 bases).

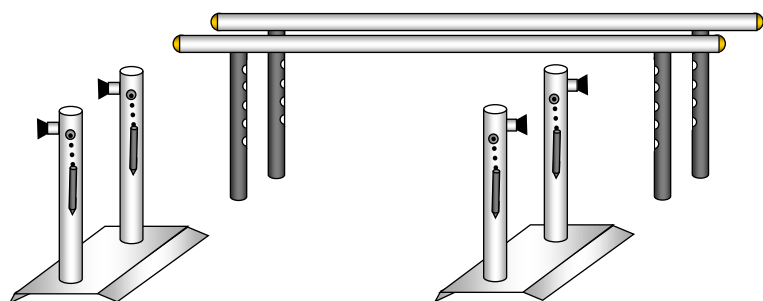

⇒ Colocar las bases sobre el suelo y realizar la instalación como se indica en la figura.

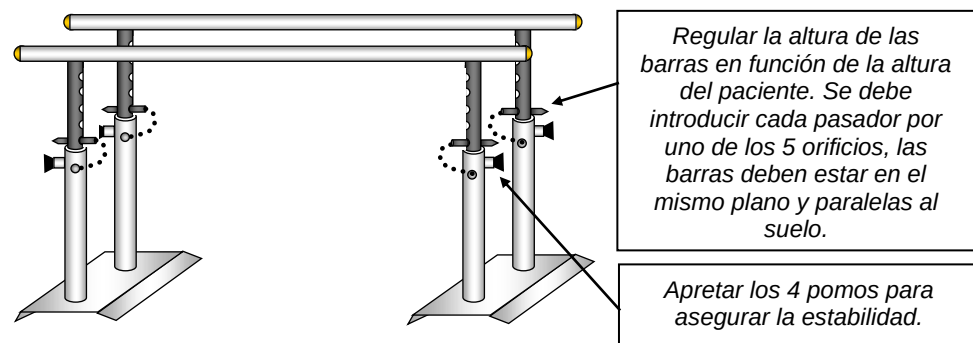

Instrucciones de utilización

- ⇒ Se deben ajustar las barras de modo que el paciente apoye en ella los brazos ligeramente flexionados. Según el orificio por el que se introduzca el pasador podemos regular la altura en 5 posiciones.
- ⇒ El paciente debe deambular entre las barras paralelas soportando parte del peso de su cuerpo con los brazos antes que con su cadera o su pierna/s afectada/s.
- ⇒ El aparato se debe utilizar siguiendo las indicaciones de un facultativo especialista
- ⇒ El facultativo especialista debe colocarse detrás del paciente con una mano sobre la barra y la otra apoyada sobre el paciente para cogerle en caso de que se caiga.

Indicaciones:

- ⇒ Reeducción de la marcha en pacientes con alteraciones del equilibrio, músculos débiles o espásticos, que no pueden apoyar la carga en una extremidad, amputados de una extremidad inferior o los que presentan otras causas de inestabilidad.

Advertencias:

- ⇒ El peso máximo del paciente debe ser de 135 kg.
- ⇒ No ajuste las barras durante el ejercicio.
- ⇒ Algunos materiales del equipo son NO ignífugos por lo que se recomienda no utilizarlo en ambientes con excesivo calor, fuego o radiaciones.

Mantenimiento:

- ⇒ Se deben realizar revisiones periódicas del producto y controlar su evolución.
- ⇒ Se recomienda una limpieza periódica (diaria o semanal) del aparato con un paño húmedo utilizando agua o un líquido limpiador casero no abrasivo.

Descripción Técnica:

- ⇒ Barras de acero pintado epoxy (Ral 7035).
- ⇒ Bases antideslizantes con rampa de acceso pintado epoxy (Ral 7035)
- ⇒ Medidas y pesos:

Código	Largo	Ancho	Alto (mín/máx)	Peso
500698	2000 mm	800mm	730/980 mm	22.4 kg
501497	2500 mm	800mm	730/980 mm	23.7 kg
501387	3000 mm	800mm	730/980 mm	26 kg
501365	3500 mm	800mm	730/980 mm	27.6 kg

Clasificación: Clase I, no estéril, sin función de medición. Este producto cumple con los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 por la que se regulan los productos sanitarios.

Asistencia Técnica: En caso de avería o fallo debe ponerse en contacto con Prim S.A. indicando el código, descripción y nº de lote del aparato.

Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.