



PRIM

Fisioterapia y Rehabilitación

al Servicio de la Salud

Equipo de Tracción Cervical
CÓD: 502295



PRIM

Fisioterapia y Rehabilitación

Manual de usuario




PRIM S.A.
Avenida del Llano Castellanos 43, planta 3
28034 Madrid, España
Teléfonos: 91 334 25 86
Fax: 91 334 25 17
e-mail: Info.fisioterapia@prim.es
www.prim.es

M.U. 502295 rev 8 05/12/2024


Componentes:

1. Soporte de pared con dos poleas, cód. 079456.
2. Asa de Glison de varilla cromada, cód. 501682.
3. Barbuquejo en simil-piel almohadillado, cód. 501683.
4. Cuerda de Nylon 6 mm (2 m), cód. 080080.
5. Gancho forma S, cód. 079260.
6. Sacos de diferentes pesos (1, 2 y 5 kg) en simil-piel, cód 501559/60/63.
7. Taco Fisher Ø 10 (2 unid).
8. Tirafondos Ø 7x70 (2 unid).

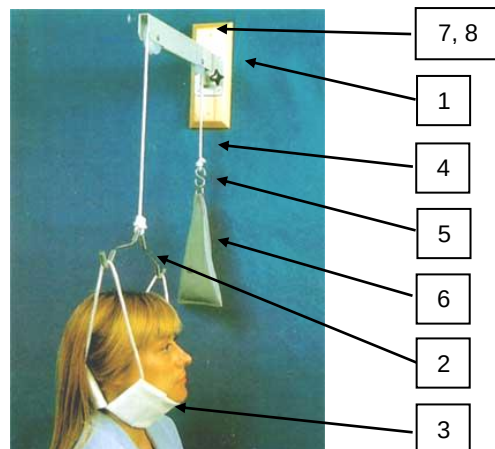

Instrucciones de instalación:


- ⇒ El equipo de tracción debe montarse en paredes de ladrillo utilizando los tirafondos y tacos que se suministran con el aparato. Si la pared no es de ladrillo se debe utilizar un material de anclaje adecuado a la pared (no incluido).

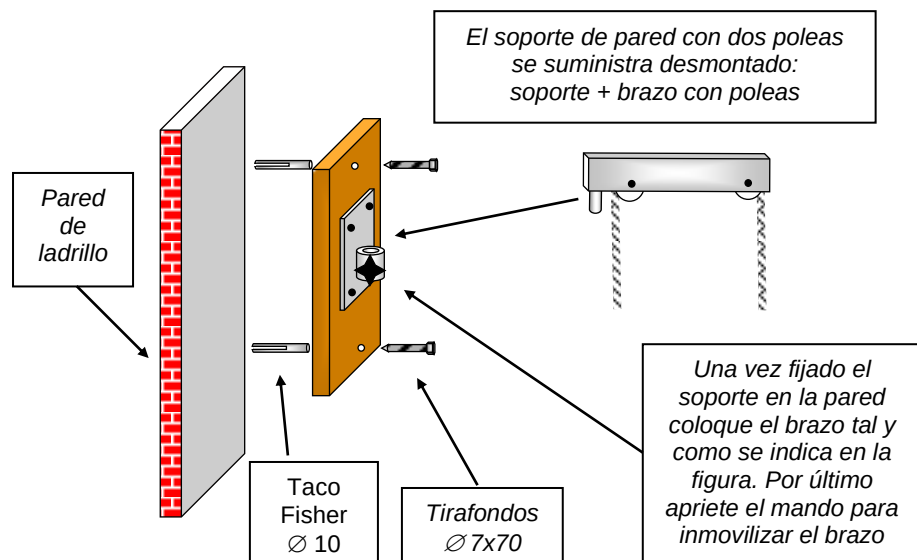

Indicaciones:

- ⇒ Artrosis.
⇒ Cervicobraquialgias.
⇒ Procesos inflamatorios que provoquen contractura muscular.

Instrucciones de uso:

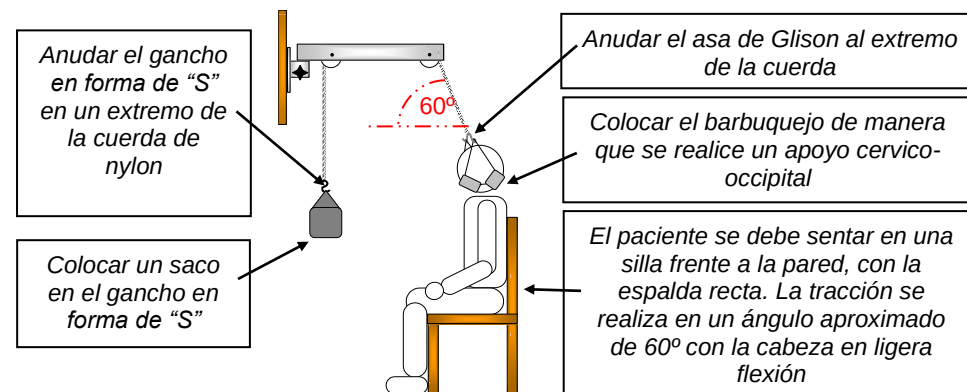

- ⇒ Aumentar pesos y tiempos progresivamente según criterio del médico. Se recomiendan sistemas progresivos incrementales, comenzando con 5-6 minutos e incrementando a razón de 2 minutos más para sucesivas sesiones, y al ritmo de 1-2.5 kg por sesión o cada dos sesiones. La duración media de las sesiones debe ser de 15-30 minutos con una frecuencia mínima de 2-3 veces por semana.

Efectos secundarios:

En algunas ocasiones el equipo de tracción cervical puede ocasionar:

- ⇒ Intolerancia dolorosa en la articulación temporomandibular y bruxismo.
⇒ Discreta hipotensión arterial tras una sesión, así como vértigos y acúfenos.

Advertencias:

- ⇒ Algunos materiales del equipo son NO ignífugos por lo que se recomienda no utilizarlo en ambientes con excesivo calor, fuego o radiaciones.
⇒ Para evitar el riesgo de atraparse los dedos o las manos, no toque el aparato mientras se esté utilizando.
⇒ Se deben revisar regularmente los componentes del equipo, en caso de desgaste excesivo (sobre todo la cuerda de nylon) se deben reemplazar.

Mantenimiento:

- ⇒ Se recomienda una limpieza periódica (diaria o semanal) del aparato con un paño húmedo utilizando agua o un líquido limpiador casero no abrasivo.

Descripción Técnica:

- ⇒ Base en madera de Haya barnizada y soporte de acero pintado epoxy (ral 7035) con dos poleas de nylon.

Clasificación: Clase I, no estéril, sin función de medición. Este producto cumple con los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 por la que se regulan los productos sanitarios.

Asistencia Técnica: En caso de avería o fallo debe ponerse en contacto con Prim S.A. indicando el código, descripción y nº de lote del aparato.

Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad componente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.