



PRIM

Fisioterapia y Rehabilitación

al Servicio de la Salud

Escalera 4 peldaños y rampa barandilla elevable, CÓD: 505577

Escalera 3 peldaños y rampa barandilla elevable, CÓD: 505576

Escalera 3 peldaños y rampa sp, CÓD: 505770



PRIM

Fisioterapia y Rehabilitación

Manual de usuario



PRIM S.A.
Avenida del Llano Castellano, 43 planta 3
28034 Madrid, España
Teléfonos: 91 334 25 86
Fax: 913 342 517
e-mail: info.fisioterapia@prim.es
www.prim.es

M.U. 505577 rev 4 05/12/2024

Escalera 4 peldaños



Escalera 3 peldaños



Escalera 3 peldaños SP




Variantes

⇒ Se suministran las siguientes variantes de escaleras:


Código	Peldaños	Soporte para guardar objetos	Barandillas regulables
505577	4	Si	Si
505576	3	Si	Si
505770	3	No	No

Instrucciones de montaje y utilización

- ⇒ Las escaleras se suministran desmontadas, siga las instrucciones de montaje que se incluyen en el embalaje.
- ⇒ Se deben nivelar las patas para que la escalera no "cojee".
- ⇒ La rampa se puede colocar formando un ángulo de 180° o 90° respecto a los escalones, para ello, la rampa dispone de dos enganches en uno de sus extremos para acoplarse en los receptáculos que se encuentran en la escalera. Apretar los tornillos de los enganches para que la holgura sea la mínima.

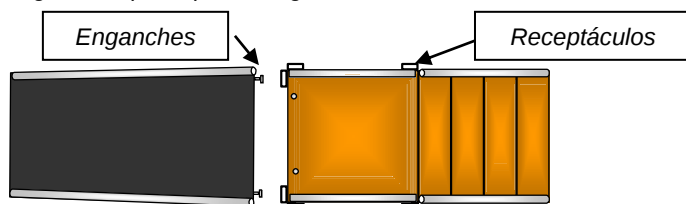

⇒ Las barandillas deben montarse según la orientación de la rampa.

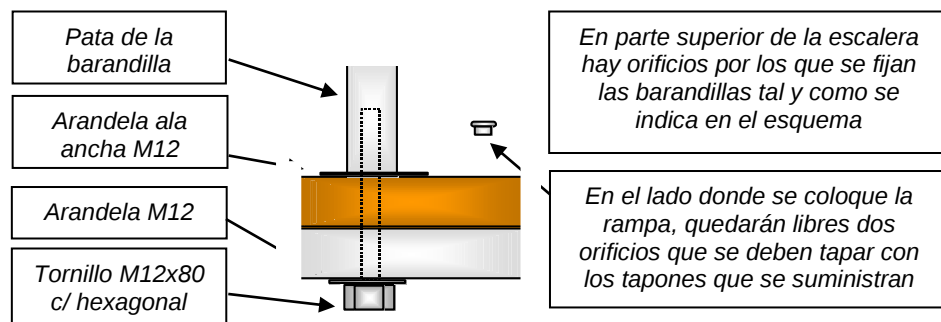

- ⇒ La altura de las barandillas se puede regular aflojando los pomos que se encuentran en cada soporte (no en el modelo 505570).
- ⇒ El modelo 505570 debe ser montado en la siguiente secuencia:
1º montar las barandillas de la plataforma y apretar los tornillos.
2º montar las barandillas de la escalera y rampa alineándolas con la de la plataforma y apretar los tornillos, estas barandillas no admite variaciones de altura posteriores.

Indicaciones:

- ⇒ Reeducación de la marcha en pacientes con alteraciones del equilibrio, músculos débiles o espásticos, que no pueden apoyar la carga en una extremidad, amputados de una extremidad inferior o los que presentan otras causas de inestabilidad.

Advertencias:

- ⇒ El peso máximo del paciente debe ser de 150 kg.
- ⇒ El facultativo especialista debe colocarse detrás del paciente con una mano sobre la barra y la otra apoyada sobre el paciente para cogerle en caso de que se caiga.
- ⇒ Al cambiar la posición de las barandillas desmontables apriete fuertemente los tornillos.
- ⇒ Asegúrese de que los pomos están fuertemente apretados cuando cambie la altura de las bandillas.
- ⇒ No arrastre el equipo cuando haya que trasladarlo.
- ⇒ Si desplaza el equipo asegurar que los enganches de la rampa estén bien ubicados.
- ⇒ Algunos de los materiales del equipo son NO ignífugos, por lo que se recomienda no utilizarlo en ambientes con excesivo calor, fuego o radiaciones.

Mantenimiento:

- ⇒ Se deben realizar revisiones periódicas del producto y controlar su evolución.
- ⇒ Se recomienda una limpieza periódica (diaria o semanal) del aparato con un paño húmedo utilizando agua o un líquido limpiador casero no abrasivo.

Descripción Técnica:

- ⇒ Estructura de acero pintado epoxy (Ral 7035).
- ⇒ Escaleras de aglomerado recubierto de haya barnizada.
- ⇒ Rampa de aglomerado recubierta con una goma antideslizante.
- ⇒ Medidas y pesos:

Código	Medidas rampa	Peso rampa	Medidas escalera	Peso escalera	Peldaños	
					h	pisa
505577	197x67 cm	46 kg	140x67 cm	59 kg	15 cm	24 cm
505576	131x59 cm	29 kg	108x59 cm	43 kg	15 cm	24 cm
505770	131x59 cm	32 kg	108x59 cm	49 kg	15 cm	24 cm

Clasificación: Clase I, no estéril, sin función de medición. Este producto cumple con los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 por el que se regulan los productos sanitarios.

Asistencia Técnica: En caso de avería o fallo debe ponerse en contacto con Prim S.A. indicando el código, descripción y nº de lote del aparato.

Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.