



ENPULS 2.0

ZIMMER ENPULS 2.0

La terapia de pulso radial un tratamiento eficaz del dolor crónico de los tejidos blandos



Enpuls 2.0
823558

Enpuls 2.0

CÓMO FUNCIONA ESTA TERAPIA

La pieza de mano contiene un proyectil que se acelera en impacta en el tejido dando como resultado pulsos radiales en el tejido diana que tratan el dolor muscular y aumentan la circulación en la zona.

Enpuls 2.0 consigue grandes resultados sobre el proceso de recuperación del tejido sin esfuerzo por parte del terapeuta y con un gran confort por parte del paciente.

Dispone de una pieza de mano ergonómica de aluminio que proporciona energía perfecta al paciente y proporciona una protección óptima contra las vibraciones de las manos del terapeuta. Nuestro equipo está diseñado con la tecnología Puls Softshot, crea pulsos radiales únicos usando un proyectil 5 veces más pesado que los sistemas de compresores de aire estándar y una velocidad final reducida al contacto con el aplicador, lo que permite trabajar con la misma energía que los equipos de la competencia pero con menos dolor al impacto por parte del paciente.


Los pulsos se activan con un pedal permitiendo al terapeuta libertad de movimiento con sus manos. Dispone además de diferentes tamaños de boquillas para poder ajustar el tratamiento en función de las necesidades terapéuticas de la lesión.

Todo esto, integrado en un maletín que permite una movilidad fácil y cómoda. Un display con un interfaz amigable e intuitivo, una pantalla de 7" y una garantía de 2 millones de pulsos hacen de este equipo un indispensable para tu clínica.



INDICACIONES:

- Tendinopatía de Inserción
- Traumatología
- Osteopatía
- Espolón en el Talón / Fascitis Plantar
- Epicondilopatía Humeral Radial y Cubital
- Síndrome de la Punta de la Rótula
- Aquilodinia
- Síndrome de Pinzamiento
- Síndrome del Tibial Anterior
- Síndromes del Dolor Miofacial
- Terapia Punto Gatillo

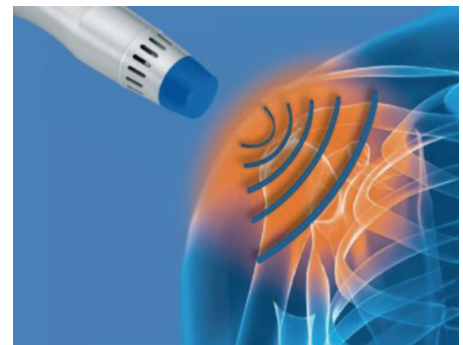

Enpuls 2.0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología: Sistema de terapia de ondas de choque radiales sin compresor con generador electromagnético como acelerador de proyectiles.

Niveles de energía/potencia:

- 60 a 185 mJ (equivalente a 1-5 bar)
- Puede ser fijado en intervalos de 10 mJ (dependiendo de la frecuencia de 60 mJ a max. 185 mJ)

Modos:

- Frecuencias desde 1 a 22 Hz

Protocolos: Más de 25 recomendaciones de tratamiento

Controles:

- 12" Pantalla táctil a color para todas las funciones software
- Control de rotación del nivel de energía y frecuencia
- Funcionamiento de la pieza de mano con pedal multidireccional

Actualización de la memoria:

- Tarjeta SD para memoria del menú indicación
- Programas favoritos y adaptados (120)
- Error log / Actualización del Firmware

Dimensiones: 20 x 35 x 30 cm (L/W/H)

Peso: 3.8 kg (sin pieza de mano)

Aplicador de la pieza de mano

- Ergonómico con carcasa de aluminio anodizado y refrigeración por ventilador

- Dimensiones 23 cm largo, 5 cm diámetro (max.)

- Peso aproximado 0.85 kg (sin cable)

- Vida útil: Garantía mínima para 2.000.000 disparos

- Mantenimiento solo necesario cuando las prestaciones bajan, no son obligatorios a partir de una determinada cantidad de disparos.

Cambio de generador por servicio de atención al cliente.

- Diámetro de la cabeza del aplicador de 6 / 15 (2 piezas)/ 25 mm

- Posibilidad de intercambio sin herramientas

- Vida útil 150.000 disparos por cabeza de aplicador

- Potencia de consumo: 100 – 240V / 50/60Hz, max. 250VA 220 V/60Hz

DATOS PEDIDO

823558 Enpuls 2.0

823560 Equipo Enpuls Pro radial 2 mangos fisioterapia + carro

823562 Equipo Enpuls Pro radial 2 mangos mixtos + carro

ACCESORIOS OPCIONALES:

823565 Boquilla 6mm

823567 Boquilla 15mm

823568 Boquilla 25mm

823569 Boquilla 39mm

823570 Tapa Prot. Silic. Estetica (10 ud)

823574 Pedal O.Choque

823575 Soporte mango

